

产品说明书

【产品名称】：印模转移杆

【规格型号】：见标签

【生产企业备案号】粤深药监械生产备 20220084 号

【医疗器械备案号】粤深械备 20221444

【产品技术要求编号】粤深械备 20221444

【主要成分】由印模转移杆由钛合金材料经CNC切削而成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。

【预期用途】：用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。

【生产日期】：见标签

【使用期限】：在遵守储运和使用规则条件下为 5 年。

【编制/修订日期】：2022 年 10 月 12 日

【使用方法】：

1. 按指示撕开包装袋，取出印模转移杆；
2. 先用高压水枪清洗干净，然后放入超声波清洗机浸泡10分钟，振荡5分钟（溶液为多酶清洗剂），然后蒸汽清洗。
3. 用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。

【主要性能参数】：

1. 产品尺寸应符合要求，允许长度和直径误差±0.2mm。
2. 产品外表面的粗糙度 $Ra \leq 1.6 \mu m$ 。

【储存与操作条件】：

储存环境：温度：5℃~40℃，相对湿度：≤80%

使用环境：温度：5℃~40℃，相对湿度：≤80%，气压：86KPa~106KPa

【禁忌事项】：

1. 系统性的疾病（肿瘤、严重的心血管系统疾病、血液系统的疾病、免疫系统的疾病）
2. 正在进行某些系统的和局部的治疗（抗凝治疗、化疗、放疗）

【注意事项】：

1. 使用前请阅读使用说明；
2. 本产品使用前应进行消毒，否则禁止使用；
3. 本产品为一次性使用，禁止重复使用；
4. 包装破损或漏气，禁止使用，用后销毁。

【配件清单】：

印模转移杆、说明书、合格证各 1 份。

【有效期限】

本产品有效期为 5 年。



不可随意丢弃



参考使用说明



未灭菌



保持干燥



制造日期



批次号



有效期