

产品说明书

【产品名称】：定位螺丝

【规格型号】：见标签

【生产企业备案号】粤深药监械生生产 20220084 号

【医疗器械备案号】粤深械备 20221447

【产品技术要求编号】粤深械备 20221447

【主要成分】定位螺丝由钛合金材料经切削加工制成。不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。

【预期用途】：用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。

【生产日期】：见标签

【使用期限】：在遵守储运和使用规则条件下为 5 年。

【编制/修订日期】：2022 年 10 月 12 日

【使用方法】：

1. 按指示撕开包装袋，取出定位螺丝；
2. 使用前进行消毒，先用高压水枪清洗干净，然后放入超声波清洗机浸泡10分钟，振荡5分钟（溶液为多酶清洗剂），然后蒸汽清洗。
3. 种植体配套用基台及螺丝同种植体组合一起使用，用于支持种植义齿上部结构

【主要性能参数】：

1. 螺纹的摩擦和螺丝的弹性不应变形，螺丝和基台应能紧固。
2. 产品外表面的粗糙度 $Ra \leq 1.6 \mu m$ 。

【储存与操作条件】：

储存环境：温度：5℃~40℃，相对湿度：≤80%

使用环境：温度：5℃~40℃，相对湿度：≤80%，气压：86KPa~106KPa

【禁忌事项】：

1. 系统性的疾病（肿瘤、严重的心血管系统疾病、血液系统的疾病、免疫系统的疾病）
2. 正在进行某些系统的和局部的治疗（抗凝治疗、化疗、放疗）
3. 局部感染
4. 癫痫病、精神病、昏迷、意识不清、生活不能自理、有夜磨牙习惯者和青少年恒牙尚未发育完全等禁用；

【注意事项】：

1. 使用前请阅读使用说明；
2. 本产品使用前应进行消毒，否则禁止使用；
3. 本产品为一次性使用，禁止重复使用；
4. 包装破损或漏气，禁止使用，用后销毁。

【配件清单】：

定位螺丝、说明书、合格证各 1 份。

【有效期限】

本产品有效期为 5 年。



不可随意丢弃



参考使用说明



未灭菌



保持干燥



制造日期



批次号



有效期

备案人/生产企业：极植科技（深圳）有限公司

住所/生产地址：深圳市宝安区福海街道和平社区永和路 45 号金丰智汇谷 A 栋厂房 301

售后服务单位：极植科技（深圳）有限公司

电话：17328389631

传真：

邮箱：info@topimplant.cn

网址：<http://www.topimplant.cn/news>